

Тифлофлэшплеер

Марка: ВУ - ТФП

Модель:

Тифломаг – 001

Инструкция по эксплуатации тифлофлэшплеера
для прослушивания говорящих книг

Екатеринбург
ООО «Круст»

Комплект поставки

1. Тифлофлэшплеер (ВУ-ТФП, модель: Тифломаг-001) для воспроизведения цифровых говорящих книг на флэш-картах 1 шт.
2. Флэш-карта с записанными книгами 1 шт.
3. Сетевой шнур 1 шт.
4. Наушники (монофонические) 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации в плоскочечатном виде 1 шт.
6. Упаковочная коробка 1 шт.

Общие указания

- Перед началом работы внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и сохраняйте его для использования (при необходимости) в дальнейшем.
- При получении аппарата проверьте его комплектацию в соответствии с приведенным выше списком.
- После транспортировки аппарата в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение трех часов.

Меры предосторожности

- Не используйте и не храните аппарат вблизи источников тепла. Не допускается хранение и использование аппарата под прямым воздействием солнечных лучей, под дождём, в помещениях с повышенной влажностью воздуха и условиях повышенной запыленности.

- Не допускайте порезов, сдавливания и других механических повреждений, а также плохого подсоединения сетевого шнура, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Также необходимо избегать чрезмерного скручивания и натяжения шнура.
- Отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки, если аппарат не используется.

Внешний вид аппарата

Аппарат имеет форму параллелепипеда, на нижней плоскости которого крепятся резиновые ножки; на верхней плоскости расположены два динамика и клавиатура управления.

Клавиатура управления состоит из восьми кнопок: семь кнопок располагаются вверху над динамиками и одна кнопка – внизу, между динамиками. А также, слева от верхней группы кнопок находится отверстие электронного микрофона. На левой торцевой стороне находится гнездо для подключения сетевого адаптера, на правой торцевой стороне – вход для CD-флешкарты и выход на наружные акустические системы.

Источники питания

Режим работы от сети переменного тока

- Подсоедините прилагаемый сетевой адаптер к гнезду электрического питания на аппарате.
- Подключите сетевой адаптер к электрической розетке 220 В, аппарат работает от внутреннего аккумулятора (при его наличии).

Установка и извлечение флэш-карты

Карта вставляется узкой стороной со скошенным углом, направленным вверх, в гнездо картридера. Карта свободно войдёт почти полностью, после чего необходимо нажать на нее с небольшим усилием до щелчка. Правильно установленная карта не должна выступать из разъёма картридера.

Для извлечения флэш-карты необходимо нажать на нее до щелчка и отпустить. При этом карта выйдет из аппарата примерно на четверть, после чего ее можно свободно извлечь.

Внимание! Запрещается извлекать флэш-карту из аппарата в режиме воспроизведения. Если это произошло, отключите электропитание примерно на 10-20 секунд, вынув сетевой шнур из розетки.

Управление тифлофлэшплеером.

Тифлофлэшплеер имеет три режима работы. **Первый режим** – режим воспроизведения с карты памяти объёмом до 64 гигабайт. **Второй режим** – режим FM приемника радио в FM диапазоне. **Третий режим** – режим диктофона.

Клавиатура плеера располагается на лицевой стороне плеера и содержит восемь кнопок, расположенных в две группы. Первая группа содержит семь кнопок расположенных в виде креста. Вторая группа состоит из одной кнопки расположенной в нижней части плеера. Расположите плеер так, чтобы первая группа кнопок находилась сверху. Всё дальнейшее описание кнопок будет проходить

относительно этого расположения. Порядок работы предусматривает две операции: настройка плеера и непосредственно работа с плеером.

Кнопки, расположенные в первой группе имеют обозначения слева направо, сверху вниз: «Функция», «Назад», «Вверх», «Воспроизведение», «Вниз», «Вперед», «Режим». В нижней части лицевой стороны плеера находится кнопка «Включение».

При включении плеер проигрывает стартовую мелодию приветствия и переходит в режим воспроизведения с карты, оповещая при этом о номере книги и номере главы и начинает чтение книги с места последнего воспроизведения. Для увеличения и уменьшения громкости воспроизведения необходимо однократно нажать кнопку «Плюс» или «Минус» соответственно.

Для перехода по главам книги необходимо кратковременно нажать кнопку «Назад» или кнопку «Вперед». Для перехода по книгам необходимо с небольшим интервалом времени два раза нажать кнопку «Назад» или кнопку «Вперед». Для озвученной перемотки необходимо нажать и удерживать кнопку «Назад» или кнопку «Вперед», в зависимости о того, в какую сторону необходимо выполнить озвученную перемотку. Для включения режима ускоренного воспроизведения необходимо нажать кнопку "Функция" столько раз, во сколько необходимо ускорение воспроизводимой книги. Максимально возможно получить двухкратное ускорение воспроизведения. Для переключения между режимами радио и режимом воспроизведения с карты памяти служит длительное нажатие кнопки "Режим". Для блокировки и разблокировки клавиатуры служит

кратковременное нажатие кнопки "Режим". Тифлофлешплеер содержит электронную память на 15 закладок. Для установки электронной закладки на интересующую главу книги служит длительное нажатие кнопки "Функция". Для перехода по закладкам служит длительное нажатие кнопок "Вверх" или "Вниз". Для включения паузы служит кратковременное нажатие кнопки "Воспроизведение". Для отключения голосовых функций плеера служит длительное нажатие кнопки "Воспроизведение". Для включения режима автовыключения служит кратковременное нажатие кнопки "Включение". При этом будет включен режим автосна через пять минут. При повторном нажатии кнопки "включение" произойдет выбор режима автовыключения через тридцать минут. Длительное нажатие кнопки "Включение" приведет к выключению плеера.


Для прослушивания программ радиопередач необходимо с помощью кнопки "Режим" перейти в режим радио и кнопками "Вперед" или "Назад" выбрать интересующую радиостанцию.

Плеер также имеет несколько режимов настройки, которые активизируются нажатием одной или нескольких клавиш при старте плеера. Чтобы войти в режим настройки радиoproграмм на желаемые частоты необходимо: выключить плеер, зажать и не отпускать кнопку "воспроизведение" и включить плеер кнопкой "Включение". Плеер оповестит о переходе в режим настройки радио. Поиск радиостанций по диапазону осуществляется нажатием кнопок "Вперед" или "Назад". Занесение интересующей радиостанции в ячейку памяти осуществляется нажатием кнопки

"Воспроизведение". После завершения операции настройки радио, плеер можно выключить или перейти в режим воспроизведения с карты кнопкой "Функция". Для перехода в режим «Цифровой Диктофон» нажмите кнопку «Режим», а затем с помощью кнопки «Воспроизведение» запустите запись. Для завершения записи повторно нажмите кнопку «Воспроизведение».

Плеер поддерживает обновление прошивки с карты памяти. Для обновления прошивки до более новой версии, необходимо выключить плеер, установить карту памяти в персональный компьютер, загрузить на нее файл прошивки. Затем необходимо установить эту карту памяти в плеер, зажать и не отпускать кнопку "функция" и включить плеер. Появится звуковой сигнал. После окончания обновления прошивки звуковой сигнал пропадет и плеер выключится. Для обновления голосовых модулей плеера необходимо записать новые голосовые модули на карту памяти, установить карту памяти в плеер, зажать одновременно кнопки "Вверх" и "Вниз" и включить плеер. Голосовые модули обновятся.

Схема расположения клавиатуры тифлофлэшплеера

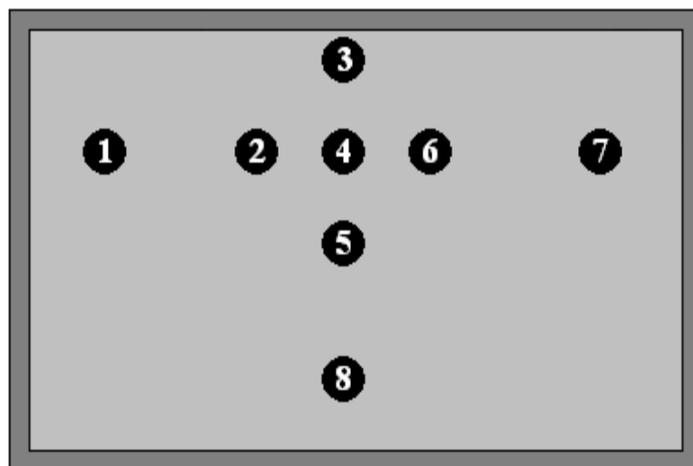

1 - кнопка «Включение»:

одно длительное нажатие – включение и выключение;

одно короткое нажатие - «сон» через 5 минут;
второе короткое нажатие «сон» через 30 минут.

2 - кнопка «Режим»:

длительное нажатие – переключение режимов,
короткое нажатие – блокировка и разблокировка клавиатуры.

1-2 – кнопки:

одновременное нажатие и удерживание – вызов интерактивной инструкции.

3 - кнопка «Функция»:

длительное нажатие – установка закладок;
короткие нажатия – увеличение скорости и звучания до 2-х раз.

4 кнопка:

короткое нажатие – увеличение громкости звучания;

длительное нажатие – возвращение к закладке в сторону увеличения.

5 кнопка:

короткое нажатие – пауза/воспроизведение.

5-1 кнопки:

одновременное длительное нажатие – включение настройки радиопрограмм (короткое нажатие кнопки 5 в режиме настройки радио – фиксация найденной радиопрограммы).

5 кнопка:

короткие нажатия – уменьшение громкости звучания; длительное нажатие – возвращение к закладке в сторону уменьшения.

7 кнопка:

короткое нажатие – переход по главам вперед;
двойное нажатие – переход по книгам вперед;
длительное нажатие – озвученная перемотка вперед.

8 кнопка:

короткое нажатие – переход по главам назад;
двойное нажатие – переход по книгам назад;
длительное нажатие – озвученная перемотка назад.

7 и 8 кнопки:

в режиме поиска радиостанций и в режиме радио – переключение радиостанции вперед и назад соответственно.

Технические характеристики

№	Наименование	Характеристики
1	Типы воспроизводимых флэш-карт	SD-card, MMC-card
2	Питание от сети переменного тока	220 – 240В, 50 – 60 Гц
3	Максимальная выходная мощность	2 x 1 Вт
4	Диапазон воспроизводимых частот	100 – 14000 Гц
5	Мощность, потребляемая от сети переменного тока	Не более 5 Вт
6	Батареи	Аккумулятор
7	Габариты аппарата, мм	82 x 110 x 39
8	Габариты упаковки, мм	220 x 156 x 75
9	Вес аппарата	0,5 кг
10	Вес в упаковке с комплектом принадлежностей	0,8 кг

Гарантия поставщика

Изделие имеет сертификат соответствия.

Поставщик гарантирует, что изделие исправно и безопасно в эксплуатации. В течение срока гарантии (гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента поставки изделия) поставщик обеспечивает восстановление функциональных характеристик изделия посредством ремонта, а при его невозможности – посредством замены изделия.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае наличия механических повреждений или нарушения правил эксплуатации.

Сервисное обслуживание на территории Российской Федерации осуществляется централизованно, на весь срок его эксплуатации (7 лет), с использованием почтового отправления (секограмма).

Производитель:

ООО «Круст»

620144, Екатеринбург, ул.Большакова, дом 105, офис 524

Телефон: (343)251-91-63, факс (343)251-91-75